

KIT Protésico

(Prosthetic Kit)

(OPK)

Manual del Usuario

OSSTEM[®]
IMPLANT

Storage Condition :
Dry place at room temperature(1°C~30°C)



Caution, Consult
accompanying
Documents

제조사 오스템임플란트(주)



생산본부
부산광역시 해운대구 반송로 513번길 66-16
TEL:051-850-2500 FAX:051-861-4693
<http://www.osstem.com>



Manufacturer
OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea
TEL : 82-51-850-2500 FAX : 82-51-861-4693
<http://www.osstem.com>

Rx only

For USA Only : Federal law restricts this
device to sale by or on the order of a dentist

Instrucciones de Uso del Kit Protésico (Prosthetic Kit)

■ Descripción del producto

El Kit Protésico consta de los instrumentos quirúrgicos necesarios para realizar una operación protésica después de la colocación de un implante Osstem (sistemas US, SS, TS). Para obtener instrucciones detalladas, consulte el catálogo protésico proporcionado por OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

■ Limpieza del Kit

Limpie los instrumentos de tratamiento después de su uso de la siguiente manera:

1. Después del tratamiento, limpie los instrumentos utilizando el método convencional, es decir, sumergiéndolos en alcohol.
2. Después de limpiar los instrumentos con agua destilada o bajo agua corriente, elimine por completo cualquier mancha de sangre o materia extraña.
3. Elimine completamente la humedad utilizando un paño seco o un ventilador térmico.
4. Inserte y asegure los instrumentos de tratamiento libres de humedad en las ranuras correctas del Kit.
5. Después de colocar los instrumentos, esterilice el Kit en un autoclave (132°C durante 15 minutos) y almacénelo a temperatura ambiente.

■ Precauciones durante el uso y la limpieza

1. La frecuencia de uso recomendada para el desatornillador (Driver) es de 50 veces. El torque recomendado es igual o inferior a 30 Ncm.
2. El número de usos recomendado para la llave angular de torque (Angled Torque Driver) es de 10, y el par recomendado es de 30 Ncm o menos.
3. La frecuencia de uso recomendada para la llave de torque (Torque Wrench) es de 50 veces.
4. Desmonte todos los instrumentos usados después de la operación, límpielos, séquelos y guárdelos a temperatura normal. Para el método de limpieza de la llave de torque (Torque Wrench), consulte el manual proporcionado en la parte inferior del Kit.
5. No deje los instrumentos en un lugar vulnerable a la contaminación.

6. Asegúrese de esterilizar estas herramientas médicas en el autoclave antes de su uso (132°C, 15 minutos).
7. No utilice peróxido de hidrógeno como desinfectante o limpiador (puede causar daños o decoloración del recubrimiento de TiN, el marcado láser, la codificación de colores).
8. Este producto tiene una garantía de UN (1) año a partir de la fecha de compra.